


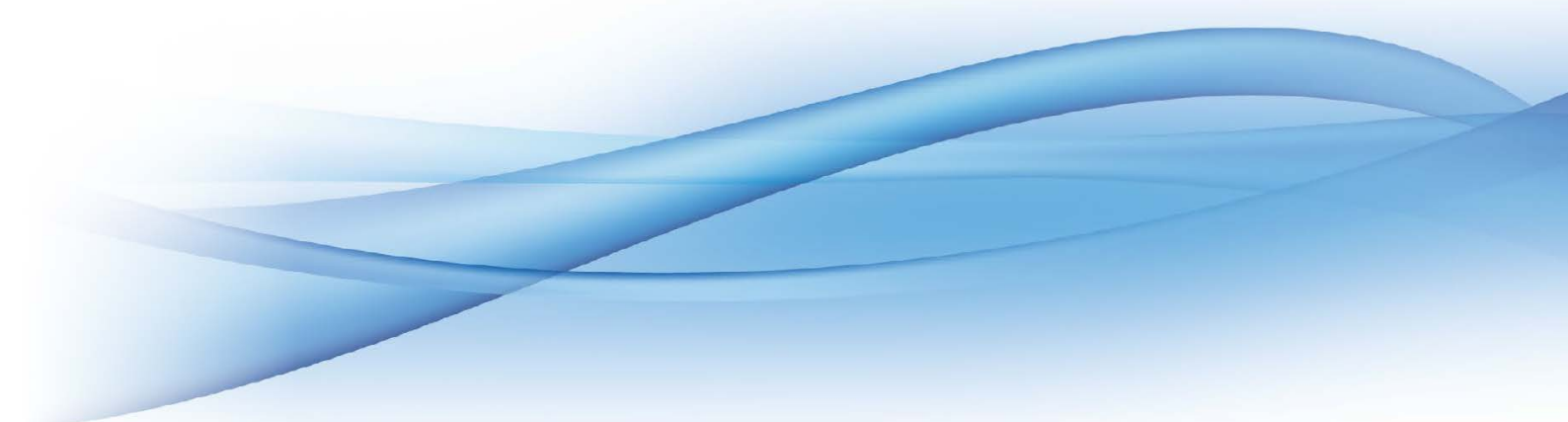

Knihovny LASAK BioniQ[®] pro 3Shape

Postup stažení a instalace



Knihovny LASAK BioniQ® 3Shape

Knihovny LASAK BioniQ®


Knihovny obsahují kompletní data pro celý implantologický systém LASAK BioniQ®, jako jsou STL soubory dosedů na implantáty (s šestihranem, bez šestihranu, mostové), dosedy na vlepované báze BioCam® (pilíře BioCam®), pilíře Screw-On a data pro pilíře Premill. Knihovny dále obsahují STL soubory skenovacích tělísek a případně nutné konfigurační soubory.

Současně s knihovnou je pro systém BioniQ® k dispozici [PDF soubor se schématem celé knihovny](#) pro lepší orientaci při výběru konkrétního řešení pro danou frézovanou konstrukci.

1 Stáhněte soubory knihovny

Knihovny pro implantologický systém BioniQ® společnosti LASAK jsou volně ke stažení na [webu LASAK](#).

Jedná se o soubory „*LASAK_BioniQ_(Ti base+Premill)_1.0.3.dme*“ a „*LASAK_BioniQ_(one piece)_V1.0.3.dme*“.

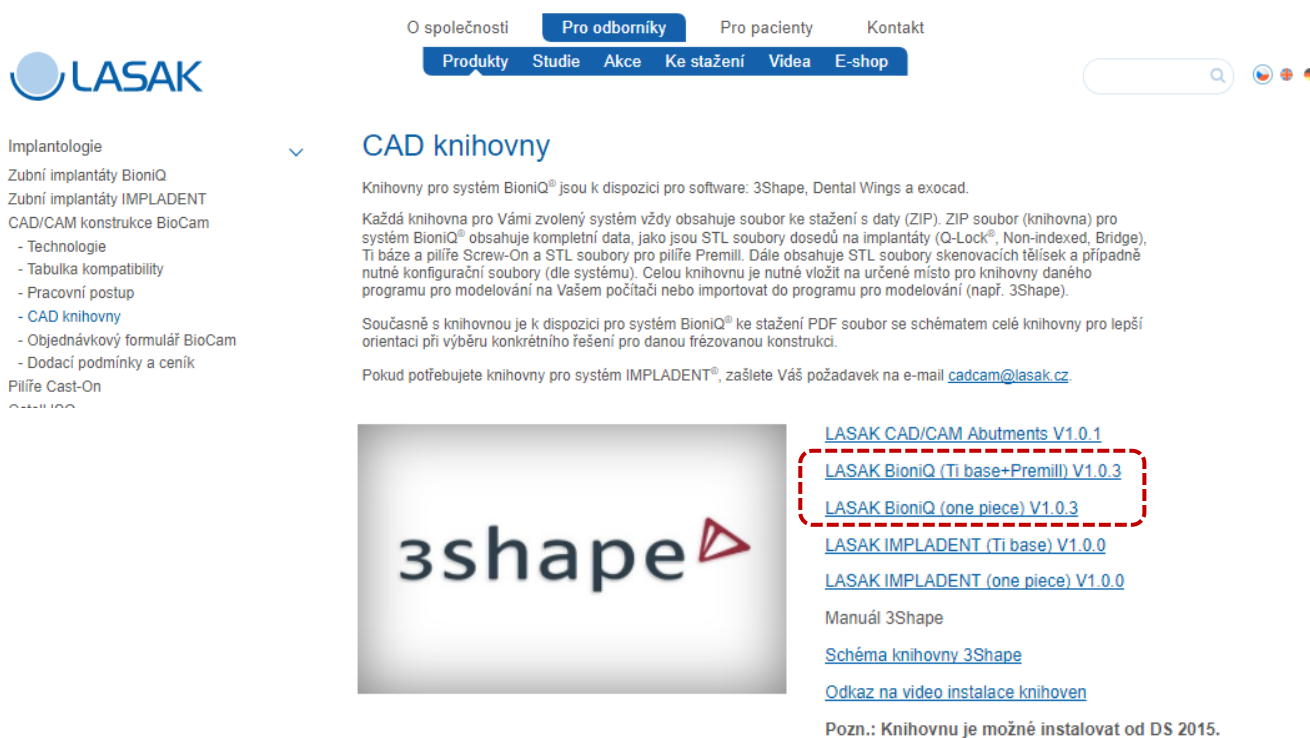

The screenshot shows the LASAK website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'Pro odborníky', 'Pro pacienty', and 'Kontakt'. Below this is a secondary navigation bar with 'Produkty', 'Studie', 'Akce', 'Ke stažení', 'Videa', and 'E-shop'. A search bar is located on the right. The main content area is titled 'CAD knihovny' and contains the following text:

Knihovny pro systém BioniQ® jsou k dispozici pro software: 3Shape, Dental Wings a exocad.

Každá knihovna pro Vámi zvolený systém vždy obsahuje soubor ke stažení s daty (ZIP). ZIP soubor (knihovna) pro systém BioniQ® obsahuje kompletní data, jako jsou STL soubory dosedů na implantáty (Q-Lock®, Non-indexed, Bridge), Ti báze a pilíře Screw-On a STL soubory pro pilíře Premill. Dále obsahuje STL soubory skenovacích tělísek a případně nutné konfigurační soubory (dle systému). Celou knihovnu je nutné vložit na určené místo pro knihovny daného programu pro modelování na Vašem počítači nebo importovat do programu pro modelování (např. 3Shape).

Současně s knihovnou je k dispozici pro systém BioniQ® ke stažení PDF soubor se schématem celé knihovny pro lepší orientaci při výběru konkrétního řešení pro danou frézovanou konstrukci.

Pokud potřebujete knihovny pro systém IMPLADENT®, zašlete Váš požadavek na e-mail cadcam@lasak.cz.

On the left side, there is a sidebar menu with 'Implantologie' expanded, showing options like 'Zubní implantáty BioniQ', 'Zubní implantáty IMPLADENT', and 'CAD/CAM konstrukce BioCam'. On the right, a list of links is provided, with 'LASAK BioniQ (Ti base+Premill) V1.0.3' and 'LASAK BioniQ (one piece) V1.0.3' highlighted with a red dashed box. Other links include 'LASAK CAD/CAM Abutments V1.0.1', 'LASAK IMPLADENT (Ti base) V1.0.0', 'LASAK IMPLADENT (one piece) V1.0.0', 'Manuál 3Shape', 'Schéma knihovny 3Shape', and 'Odkaz na video instalace knihoven'. A note at the bottom states: 'Pozn.: Knihovnu je možné instalovat od DS 2015.'

Oba soubory uložte do Vámi preferované složky softwaru 3Shape ve Vašem počítači

Pozn.:


Knihovna „*LASAK_BioniQ_(one piece)_1.0.3.dme*“ není schopna generovat výstup pro frézování jinde než v LASAK, Centru BioCam. Konstrukce kotvené přímo do implantátu frézuje pouze LASAK, Centrum BioCam.

Knihovna „*LASAK_BioniQ_(Ti base+Premill)_1.0.3.dme*“ obsahuje volně dostupné plně funkční modely.

Konstrukce na titanové báze, pilíře Screw-On a Premill je možné frézovat i mimo LASAK, Centrum BioCam.


Knihovny LASAK BioniQ® 3Shape

2 Spusťte program 3Shape Dental System Control Panel

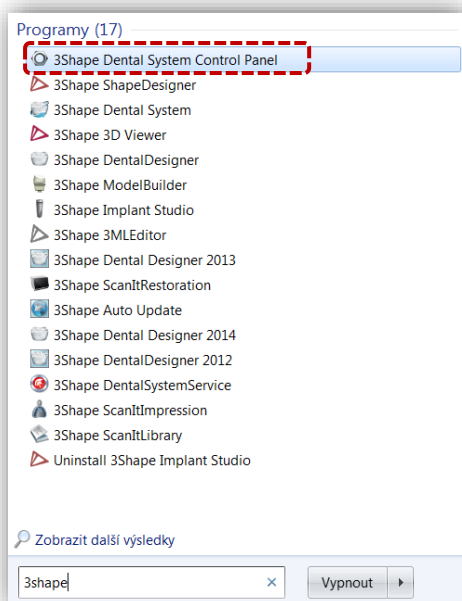

3 Importujte stažené knihovny

V menu „Tools“ klikněte na „Import/Export“.

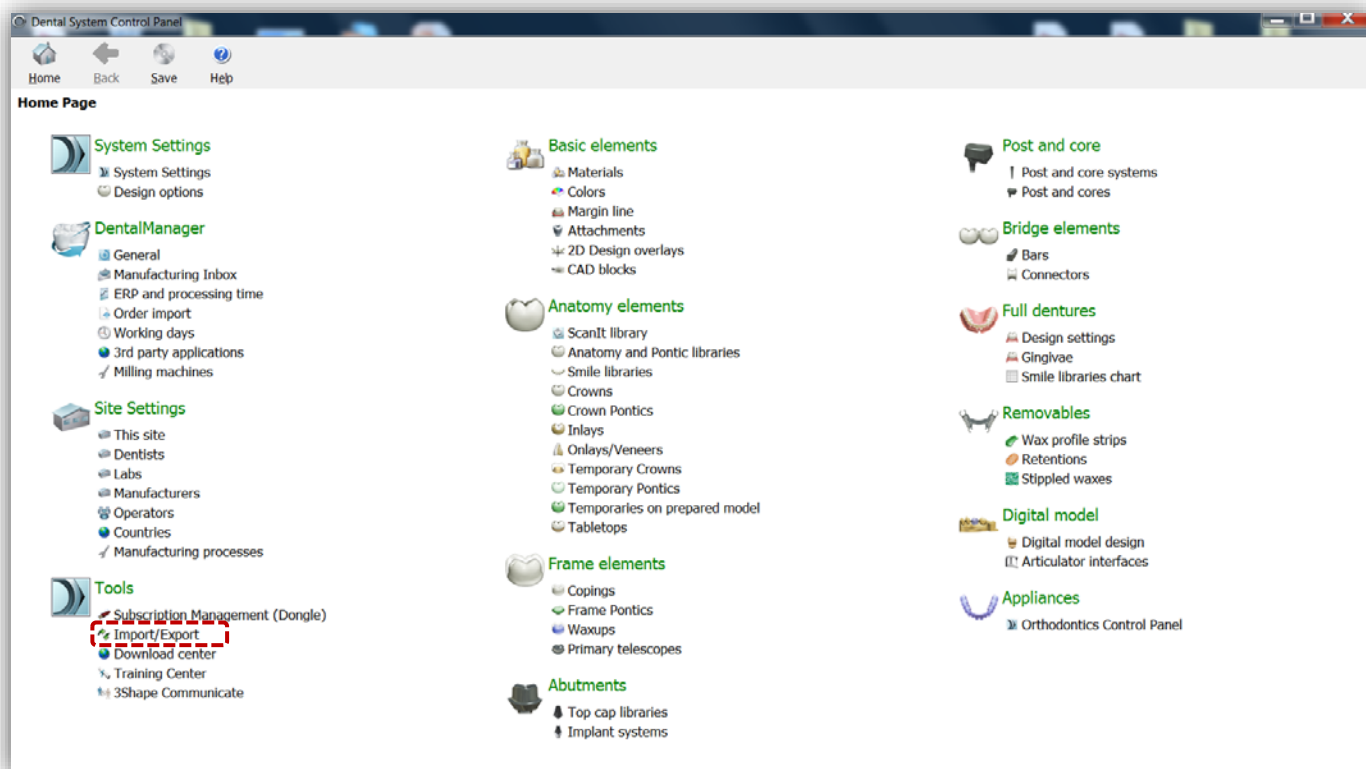


Knihovny LASAK BioniQ® 3Shape

Klikněte na „*Import materials*“.




Vyberte stažené soubory knihoven „*LASAK_BioniQ_(Ti base+Premill)_1.0.3.dme*“ a „*LASAK_BioniQ_(one piece)_1.0.3.dme*“ a postupně je importujte kliknutím na „*Import*“.

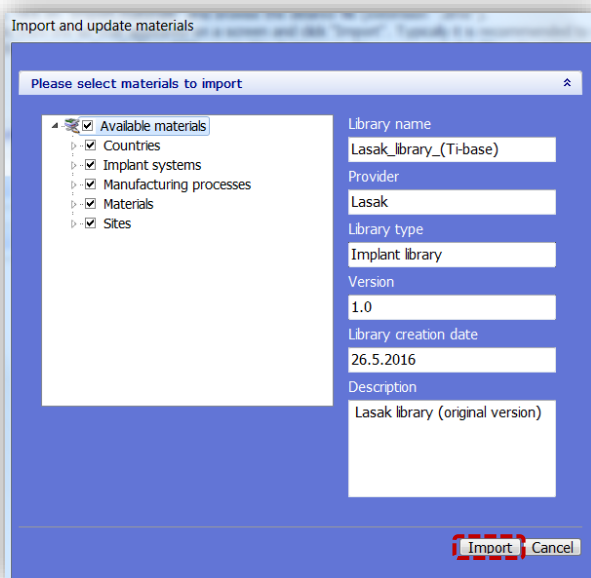

4 Uložte

Po naimportování všech knihoven uložte přes volbu „*Save*“ v horní části okna. Uložení potvrďte kliknutím na „*Yes*“

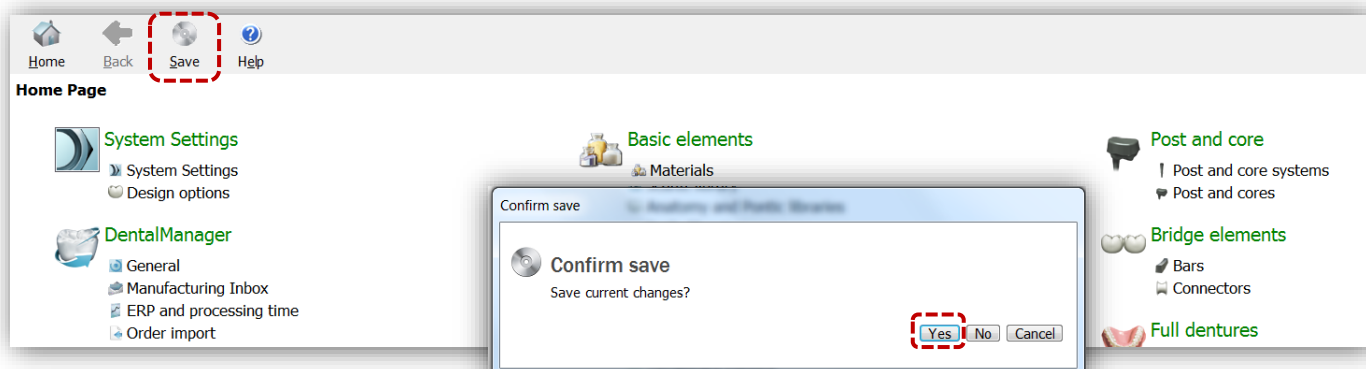

Knihovny LASAK BioniQ® 3Shape

5 Knihovny jsou připravené k použití

Po importování jsou knihovny dostupné pod volbou „Manufacturers“ a „Manufacturing Processes“, které jsou v menu pod sekcí „Site Settings“.

