
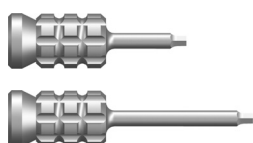


## Šroubováky

Implantologický systém IMPLADENT používá dvě hlavní skupiny upevňovacích šroubů – fixační šrouby pilířů a šrouby pro fixaci konstrukce. K dotažení fixačních šroubů (stejně jako krycích šroubků implantátu, vhojovacích válečků a dalších komponent) používá systém IMPLADENT šroubovák **hex 1.4**. Na šrouby pro fixaci konstrukce do pilířů pro šroubované náhrady a TS šroubků používá systém IMPLADENT šroubováky **hex 1.0**.

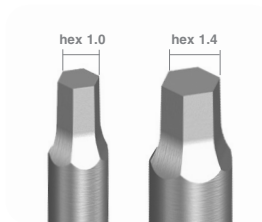

### Šroubovák imbus ruční intraorální

<b>hex 1.4</b> /L11/L18, extra krátký	3224.3
<b>hex 1.4</b> /L11/L25, krátký	2224.3
<b>hex 1.4</b> /L21/L35, dlouhý	2524.3
pro šroubované náhrady <b>hex 1.0</b> /L11/L25, krátký	5224.3
pro šroubované náhrady <b>hex 1.0</b> /L21/L35, dlouhý	6224.3


Pro zajištění spolehlivého utěsnění rozhraní implantátu a pilíře a zamezení povolení šroubu je nezbytné jeho utažení ráčnou (924.3) s nasazeným momentovým adaptérem (3024.3). Uťahovací moment fixačních šroubů pilířů je 35 Ncm. Pro upevnění finální práce použijte nový fixační šroub. Pro dotahování šroubů pro fixaci konstrukce a dalších komponent se používají jiné uťahovací momenty – viz. dále.



Ráčna	924.3
-------	-------



Momentový adaptér pro ráčnu	3024.3
-----------------------------	--------

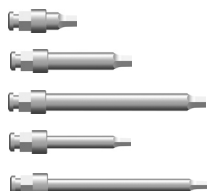

### Šroubováky do ráčny

<b>hex 1.4</b> /L4, extra krátký	24224.3
<b>hex 1.4</b> /L11, krátký	4224.3
<b>hex 1.4</b> /L21, dlouhý	4024.3
pro šroubované náhrady <b>hex 1.0</b> /L11, krátký	44224.3
pro šroubované náhrady <b>hex 1.0</b> /L21, dlouhý	24024.3

## Přehled uťahovacích momentů

**Fixační šrouby pilířů** / Šroubováky **hex 1.4** (24224.3, 4224.3, 4024.3) / uťahovací moment 35 Ncm

**Pilíře pro provizorní práce PEEK** / Šroubováky **hex 1.4** (24224.3, 4224.3, 4024.3) / uťahovací moment 20 Ncm

**Šrouby pro fixaci konstrukce a TS šroubky** / Šroubováky **hex 1.0** (44224.3, 24024.3) / uťahovací moment 15 Ncm

**Kulový attachment** / Zavaděč – prodlužovací klíč (2024.3) / uťahovací moment 35 Ncm

**Locator** / Šroubovák Locator (09999) / uťahovací moment 35 Ncm

**Attachmenty Titanmagnetics** / Příslušný zavaděč (H.00.04.X2, H.00.04.K2) / uťahovací moment 20 Ncm

Protetické instrumentárium, obsahující ráčnu s momentovým adaptérem a šroubováky **hex 1.0** a **hex 1.4**, je možné si zapůjčit.

**Pro upevnění finální práce je vhodné použít vždy nový fixační šroub.**

